


Guide rapide

Modèle CL-65 (50 dB)
Modèle CL-30 (40 dB)

Sans fil amplifié
DECT avec afficheur
parlant et confirmation
de composition


Serene Innovations inc.
14 615, Carmenita Road
Norwalk, CA 90650
Tél : 562-407-5400

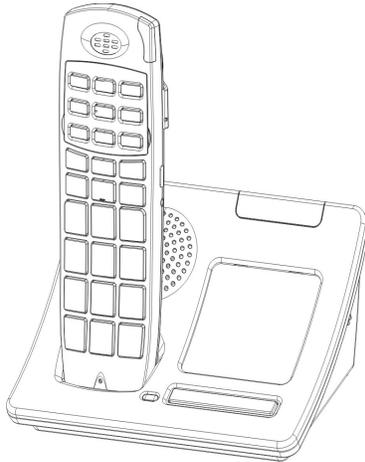


Contenu de l'emballage




Combiné

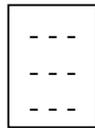

Guide

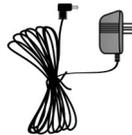

Adaptateur CA

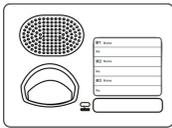

Socle




Cordon de
ligne



Piles
rechargeables
pour le combiné


Installation

1. Installer les piles du combiné (incluses) et du socle (non-incluses) tel qu'illustré.
2. Branchez l'adaptateur CA et le cordon de ligne au socle tel qu'illustré.
3. Recharger le combiné 24 heures avant l'usage

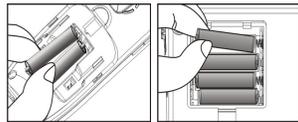

Vers prise tél
Vers prise CA

FONCTIONS ET COMMANDES

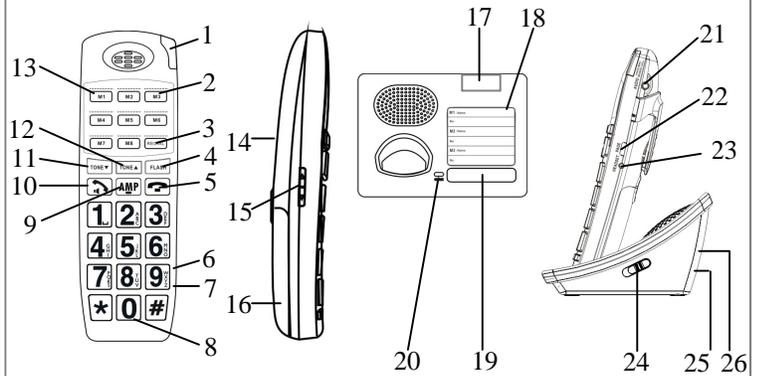

1. Indicateur : **en utilisation/sonnerie/message/nouvel appel**
2. **Boutons de mémoire à une touche M2 à M8**
3. **Touche (Redial) recomposition/pause**
4. Bouton(**Flash**) **Active l'appel en attente**
5. Bouton (**End**) ; Pour terminer un appel
6. **Interrupteur d'amplification automatique**
7. **Interrupteur Afficheur parlant / confirmation de composition** (6 et 7 dans le compartiment de piles)
8. **Clavier**
9. Bouton (**AMP**) avec indicateur, pour activer l'amplificateur.
10. Bouton (**Talk**) Pour faire ou répondre à un appel. durant l'appel, il active le mains-libres.
11. Bouton (**Tone up**) ; contrôle la tonalité et le volume de sonnerie
12. Bouton (**Tone down**) ; contrôle la tonalité et le volume de la sonnerie.
13. Bouton (**M1**) ; Active le mains-libres.
14. **Haut-parleur**
15. (**< >**) Volume haut/bas (sur le côté)
16. **Couvercle du compartiment de piles**
17. **Indicateur du socle / en utilisation**
18. **Feuille du répertoire des mémoires à une touche.**
19. Bouton (**Page**) : Pressez pour trouver votre combiné à partir du socle
20. **Indicateur de charge**
21. **Prise audio** sortie audio pour accessoires d'écoute (Modèle CL-65)
22. Bouton (**Page**) : pressez pour activer l'intercom ou transférer un appel.
23. **Prise pour micro-casque**
24. **Contrôle du volume de sonnerie du socle** (Modèle CL-65)
25. **Prise de l'adaptateur CA**(arrière)
26. **Prise de ligne**(arrière)

Répondre à un appel

1. Pressez la touche (talk) lorsque le téléphone sonne. (Repressez le pour activer le mains-libres au besoin)
2. Pressez la touche (end) pour terminer l'appel.

Faire un appel

1. Composer le numéro désiré.
2. Pressez la touche (talk) pour prendre la ligne. (Repressez le pour activer le mains-libres au besoin)
3. Pressez la touche (end) pour terminer l'appel.

Amplification, volume et tonalité

1. Pendant un appel, pressez la touche (AMP) pour activer ou désactiver l'amplification (**ATTENTION**) : Lorsqu'il est activé, (illuminé), un niveau d'amplification est ajouté au volume du combiné.
2. Pressez les touches(< >) (sur le côté) pour ajuster le volume (5 niveaux).
3. Lorsque la touche (AMP) est activée, pressez (tone up) ou (tone down) pour régler la tonalité afin d'améliorer la clarté des mots entendus (4 réglages)

PROGRAMATION DES TOUCHES MÉMOIRES

1. Hors –ligne composez le numéro à mémoriser
2. Pressez et tenez enfoncé la touche M3 (M1 à M8) durant 6 secondes pour programmer

COMPOSER UN NUMÉRO PROGRAMMÉ

1. Hors-ligne pressez (M3) pour choisir le numéro
2. Pressez la touche (talk) pour prendre la ligne
3. Pressez la touche (end) pour terminer l'appel

Effacer l'indicateur de nouveaux appels

Hors-ligne tenez enfoncé la touche (flash) durant 6 secondes.

Éteindre un combiné


1. Lorsque hors-ligne, maintenez la touche (end) durant 6 secondes.
2. Pour allumer le combiné maintenez la touche (end) durant 6 secondes.
3. Avant d'utiliser le combiné, attendez une tonalité de confirmation, celle-ci indique que le socle et le combiné sont coordonnés

Coordonner un autre combiné

1. Tenir enfoncé la touche (page) du socle durant 6 secondes. Le mode de coordination est confirmé par un double bip et DEL clignotants.
2. Tenez enfoncée la touche (page) du combiné
3. Attendez la tonalité de confirmation et relachez.

Amplification automatique et fonctions vocales

1. Ouvrir le compartiment de piles et trouvez les deux petits interrupteurs.
2. Mettre l'interrupteur 1 à **ON** pour l'amplification automatique.
3. Mettre l'interrupteur 2 à **ON** pour activer l'afficheur parlant et la confirmation de composition.

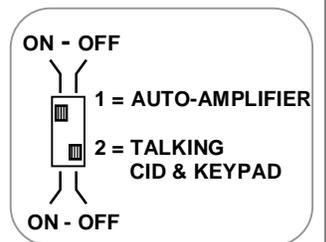

Sélecteur de langues

1. Trouvez l'interrupteur de langues dans le compartiment de pile.
2. Choisir French pour Français et English pour Anglais.